


L'extracteur de col modulaire doit être démonté avant d'être nettoyé.

Reference	Designation
2-0198100	Extracteur de col modulaire

I. INSTRUCTIONS DE DEMONTAGE AVANT NETTOYAGE :


Avant le nettoyage, dévisser la partie haute (1) de l'extracteur de col modulaire.

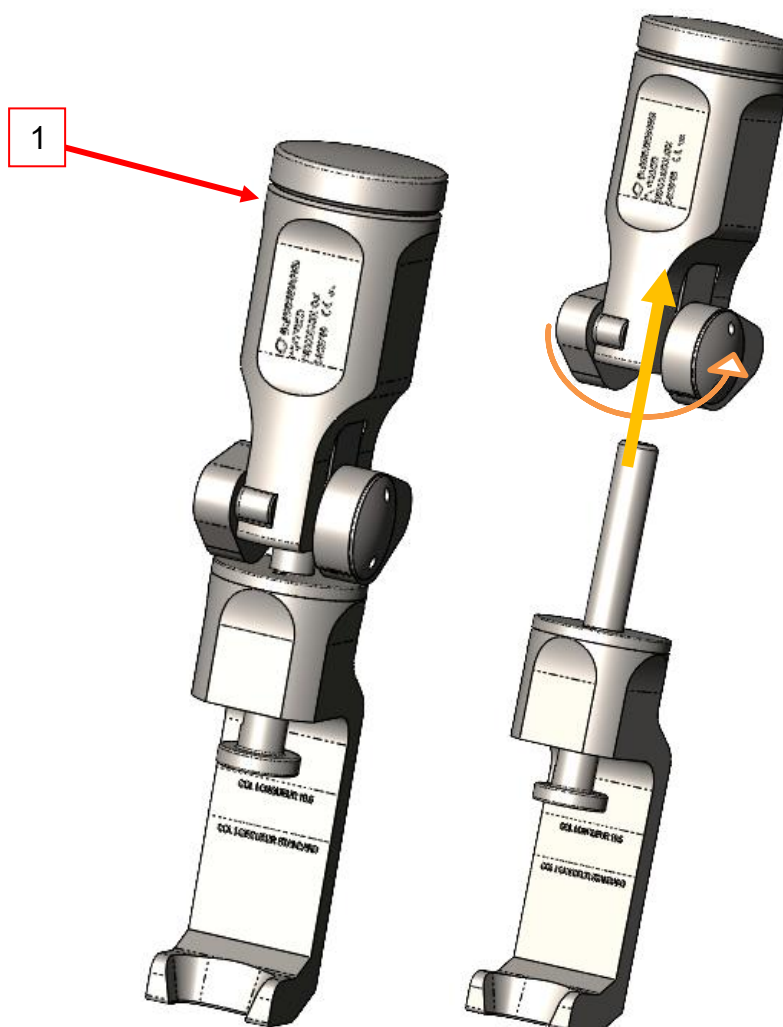

II. INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Après démontage de l'instrument, procéder au nettoyage et à la désinfection de l'instrument conformément aux instructions de la notice NO103.

III. INSTRUCTIONS DE MONTAGE

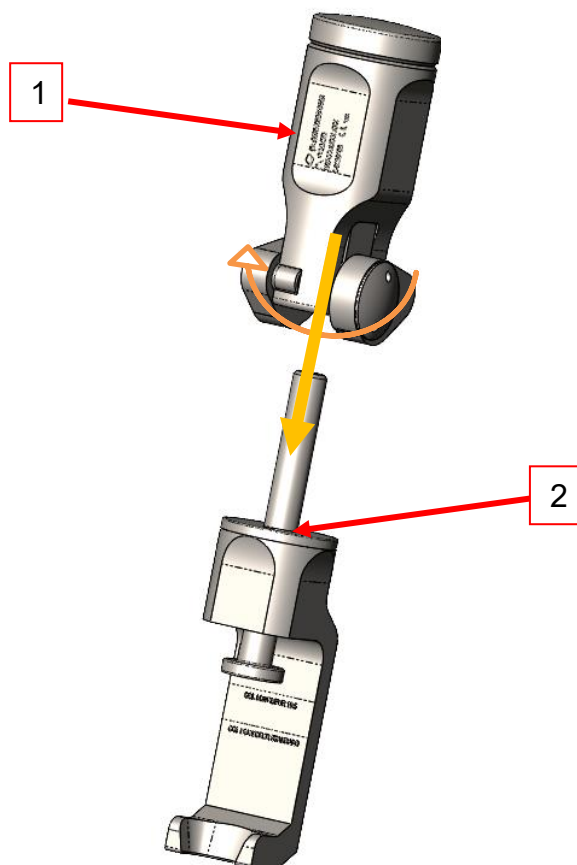

Revisser la partie haute (1) de l'extracteur de col modulaire sur la partie basse (2).

IV. INSTRUCTIONS DE STERILISATION :

Procéder à la stérilisation de l'instrument selon les instructions de la notice NO103.

V. PRECAUTIONS D'UTILISATION

Cette notice ne se substitue pas à la notice d'instructions instruments réutilisable Amplitude NO103 mais la complète.

Dans des conditions normales d'utilisation, ce produit peut être utilisé aussi longtemps qu'il n'est pas détérioré.